



Tất cả các màu răng tự nhiên được xác định theo hệ thống
và có thể tái phục hình với hệ thống so màu 3D duy nhất
VITA SYSTEM 3D-MASTER

Hướng dẫn sử dụng so màu VITA Toothguide 3D-MASTER

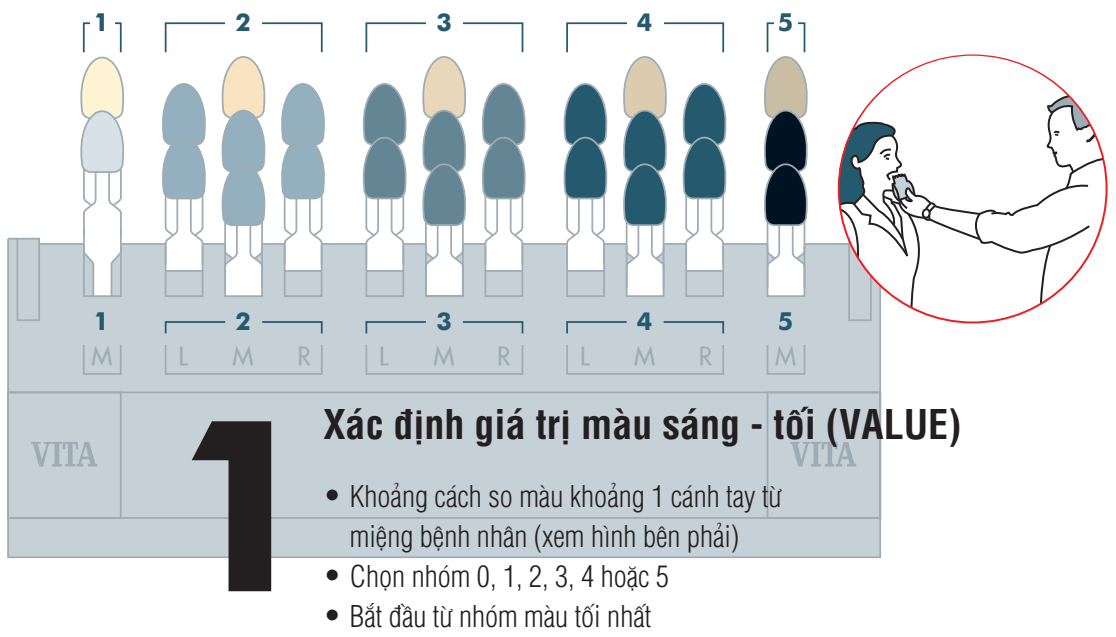


1 Xác định giá trị màu sáng - tối (VALUE)

- Khoảng cách so màu khoảng 1 cánh tay từ miệng bệnh nhân (xem hình bên phải)
- Chọn nhóm 0, 1, 2, 3, 4 hoặc 5
- Bắt đầu từ nhóm màu tối nhất

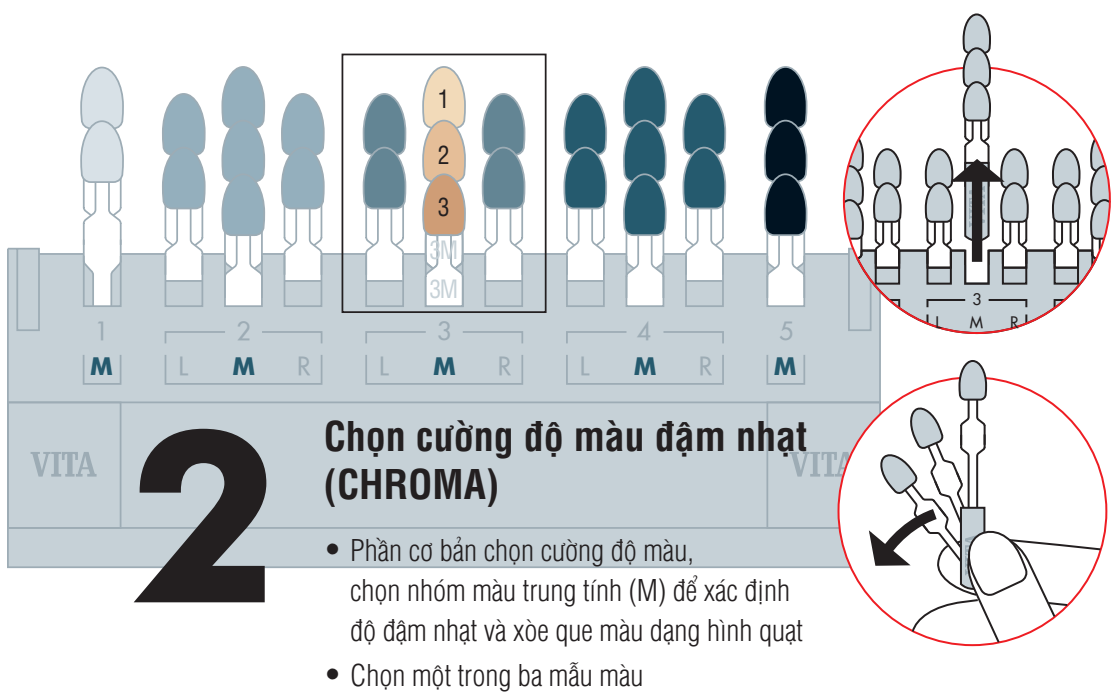

2 Chọn cường độ màu đậm nhạt (CHROMA)

- Phần cơ bản chọn cường độ màu, chọn nhóm màu trung tính (M) để xác định độ đậm nhạt và xòe que màu dạng hình quạt
- Chọn một trong ba mẫu màu

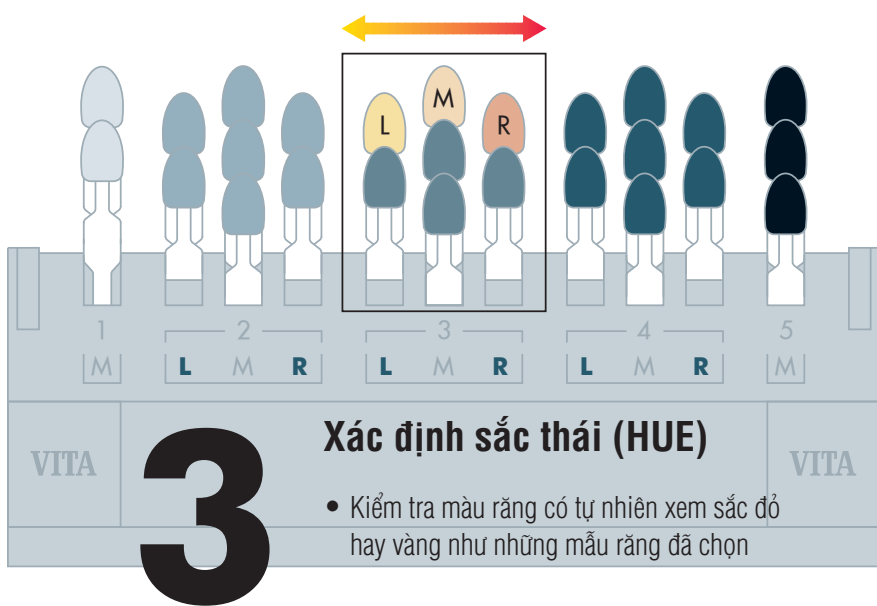

3 Xác định sắc thái (HUE)

- Kiểm tra màu răng có tự nhiên xem sắc đỏ hay vàng như những mẫu răng đã chọn

Xem thêm chi tiết ở mặt sau!

Xác định giá trị trung gian

Một phương pháp xác định màu chính xác hơn bằng cách xác định độ sáng và độ sậm của các màu nhanh chóng. Sử dụng hai màu lân cận để xác nhận rằng màu răng chính xác trong trường hợp màu không thuộc vô màu này hoặc màu kia.


Ví dụ: 4.5M2 là màu trung gian giữa (VALUE) 4M2 và 5M2
2M1.5 là màu trung gian giữa (CHROMA) 2M1 và 2M2

Màu trung gian cũng có thể được ghi chú trên các tờ thông tin.


Colour communication form


(Order no. 914 E)

1st step

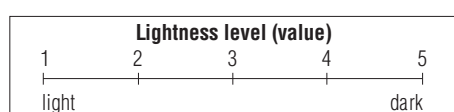

2nd and 3rd step

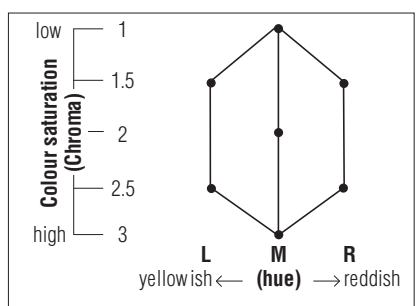

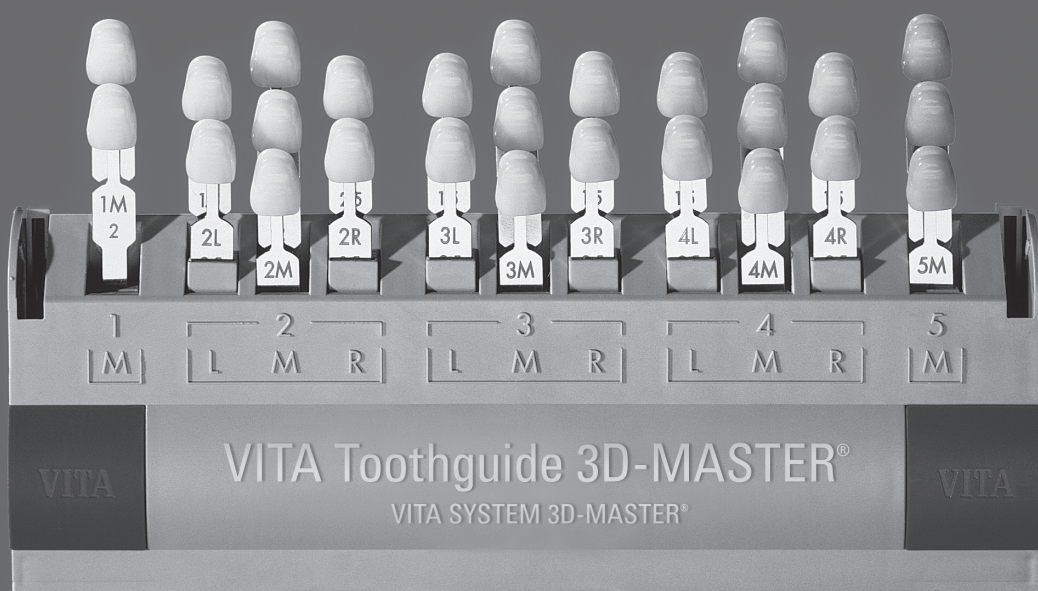

Tất cả các cây so màu thuộc mức độ đậm nhạt (1- 5) có cùng giá trị độ đậm nhạt (xem ảnh đen trắng). Sự khác biệt trong mức độ đậm nhạt phản ánh các mức độ khác nhau của sắc độ và màu sắc. Chúng được xác định ở bước **2** và **3**.

Mục tiêu trong bước **1** là xác định mức độ đậm nhạt chính xác (1-5) và không phải màu đơn lẻ của răng mẫu (1 trên 26).

Tất cả các mẫu màu răng của một nhóm M đều có cùng màu sắc và độ đậm nhạt. Chỉ khác nhau về **sắc độ (chroma)**.

Các bí quyết trong việc so màu:

- So màu trước khi mài. Tránh quá trình gây mất nước làm màu trông có vẻ trắng hơn.
- So màu trong ánh sáng ban ngày và dưới ánh đèn sáng tự nhiên (5000K) và tránh không nên để dưới ánh đèn quá sáng.
- Bởi vì mắt sẽ mệt sau 5-7 giây, nên thao tác và ra quyết định nhanh.
- Tránh sử dụng các màu sáng khi xung quanh khi so màu: không son môi, đeo kính màu, không mặc quần áo màu sáng...

Hướng dẫn vệ sinh và chăm sóc:

Tất cả các bộ phận bằng nhựa của bảng so màu VITA 3D-MASTER của bạn đều có chất lượng cao, vật liệu chịu nhiệt độ và dễ dàng vệ sinh. Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ bảng so màu ở mức nhiệt độ tối đa 140°C.

Khử trùng:

VITA Toothguide 3D-MASTER có thể được khử trùng trên bề mặt. Không sử dụng chất khử trùng có chứa phenol hoặc các hợp chất có nhóm phenol và methyl ethyl xeton do sẽ gây hại cho thanh so màu.

Lưu ý:

Các bộ phận bằng nhựa của VITA Toothguide 3D-MASTER không có khả năng chống tia cực tím. Bảng so màu không nên tiếp xúc với ánh nắng nhiều.

